


便の取り方は、下記のとおりお願いいたします

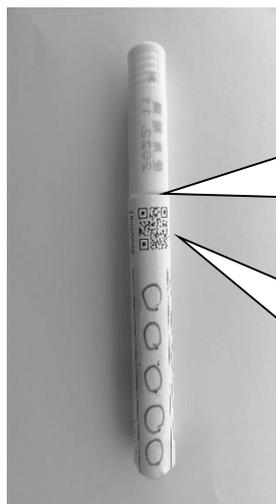

氏名シールやセロテープでキャップをふさがないでください。

QRコードがキャップ側にくるよう必ず縦に貼ってください。

- ① 本体からキャップを上向きにゆっくり引き抜きます。
- ② 先端のくぼみに少量の便をとります。(便の量は1回の採取で十分です。)
- ③ 便の付着したキャップを採便管に戻し【パチッ】と音がするまでしっかり閉めます。
- ④ 氏名ラベルに必要事項を記入後、貼付してください。

(注意) 採取した検体(便)は涼しい場所で保管し、1週間以内にご提出ください。女性の方は生理中でも検査できます。
お名前が印字済みの氏名シールはご本人以外は使用できません。
氏名シールのない方は必ず予備の無記名シールに団体名・所属名・お名前をご記入ください。